

Gebruiksaanwijzing: Gezichtsvizierset

Vervangbaar vizier voor bescherming van gezicht en ogen.

- Verwijder de beschermende laag aan beide kanten van het vizier.
- Schuif de uitsparing in het vizier over het bevestigingspunt aan één kant van het frame.
- Buig het vizier naar het tweede bevestigingspunt.
- Schuif de uitsparing in het vizier over het tweede bevestigingspunt.

Steriliseerbaar d.m.v. stoomsterilisatie (autoclaaf) met de aangegeven temperatuur

Reinigingsinstructies:

- Het frame kan worden gesteriliseerd met gebruiken van een standaard stoomautoclaafcyclus op 121°C.
- Vizieren/schermen zijn ontworpen om na gebruik te worden weggegooid.

Ook verkrijgbaar:

Oogbeschermingset

- Navulset voor gezichtsvizier
- Navulset voor oogbescherming

Brillenmontageset

Alleen voor professioneel gebruik. Niet beschikbaar voor het algemeen publiek.



18000



18001



18002



18003

Niet gemaakt van natuurlijk rubberlatex



GEMAAKT IN
CHINA



18004



18005



18010



18015



Huanghua Promisee Dental Co., Ltd.
Mould Industry Garden Empolder Section
Huanghua, 061100 Hebei, P.R. China



Young Microbrush Ireland Ltd.
Clogherane, Dungarvan
Co. Waterford, X35 VE02, Ireland



MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Münster
Germany

Verantwoordelijke
persoon in het Verenigd
Koninkrijk

Medimap Ltd
2 The Drift, Thurston
Suffolk, IP31 3RT, United Kingdom

Vervaardigd
voor:

Young Innovations, Inc.
2260 Wendt Street
Algonquin, IL 60102 USA
www.younginnovations.com
(800) 325-1881

Symbool	Beschrijving	Symbool	Beschrijving
	Productreferentienummer		Medisch apparaat
	Steriliseerbaar d.m.v. stoomsterilisatie (autoclaaf) met de aangegeven temperatuur		Fabrikant
	Land van herkomst		Importeur
	Houdbaarheidsdatum		Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
	Niet gebruiken als verpakking is beschadigd		Conformiteit CE-markering
	Raadpleeg gebruiksaanwijzing		Batch- of partijcode
	Unieke apparaatidentificatie (UDI)		