

Instructions d'utilisation : kit de visière faciale

Visière remplaçable pour protéger le visage et les yeux

- Retirez la couche protectrice des deux côtés de la visière.
- Faites glisser la découpe de la visière sur le point de fixation situé sur un côté du cadre.
- Pliez la visière jusqu'au deuxième point de fixation.
- Faites glisser la découpe de la visière sur le deuxième point de fixation.

Stérilisable dans un stérilisateur à vapeur (autoclave) à la température spécifiée.

Instructions de nettoyage :

- Le cadre peut être stérilisé en utilisant un autoclave à vapeur standard (cycle à 121 °C).
- Les visières/écrans sont conçus pour être jetés après utilisation.


Également disponible :

Kit de protection oculaire

- Kit de recharge pour visière faciale
- Kit de recharge pour protection oculaire

Kit de fixation pour lunettes

Réservé à un Usage Professionnel. Non Disponible Pour le Grand Public.

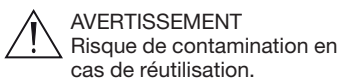

18000



18001



18002



18003

Non fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel



FABRIQUÉ EN CHINE



18004



18005



18010



18015



Huanghua Promisee Dental Co., Ltd.
Mould Industry Garden Empolder Section
Huanghua, 061100 Hebei, P.R. China



Young Microbrush Ireland Ltd.
Clogherane, Dungarvan
Co. Waterford, X35 VE02, Ireland



MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Münster
Germany

Responsable Au Royaume-Uni

Medimap Ltd
2 The Drift, Thurston
Suffolk, IP31 3RT, United Kingdom

Fabriqué pour :

Young Innovations, Inc.
2260 Wendt Street
Algonquin, IL 60102 USA
www.younginnovations.com
(800) 325-1881

Symbole	Description	Symbol	Description
	Numéro de référence		Dispositif médical
	Stérilisable dans un stérilisateur à vapeur (autoclave) à la température spécifiée.		Fabricant
	Pays d'origine		Importateur
	Date limite d'utilisation		Représentant autorisé dans la Communauté européenne
	Ne pas utiliser si l'emballage est abîmé		Marquage CE Conformité
	Lire les instructions d'utilisation		Numéro de lot
	Identifiant unique de dispositif		