

# Gebruiksaanweisung: Gesichtsschutz-Set

## Austauschbares Visier zum Schutz von Gesicht und Augen

- Ziehen –Sie die Schutzfolie auf beiden Seiten des Visiers ab
- Schieben Sie die Aussparung am Visier auf den Befestigungspunkt auf einer Seite des Rahmens.
- Biegen Sie das Visier zum zweiten Befestigungspunkt hin.
- Schieben Sie die Aussparung des Visiers auf den zweiten Befestigungspunkt.

Kann bei der angegebenen Temperatur in einem Dampfsterilisator (Autoklav) sterilisiert werden.

## Reinigungsanleitung:

- Der Rahmen kann in einem Standard-Dampfsterilisationszyklus (Autoklav) bis 121 °C sterilisiert werden.
- Visiere/Schilde sind zur einmaligen Verwendung bestimmt und nach Gebrauch zu entsorgen.

## Ebenfalls erhältlich:

### Augenschutz-Set

- Gesichtsvisioner-Nachfüllset
- Augenschutz-Nachfüllset

### Brillenhalter-Set

Nur für den professionellen Gebrauch. Nicht für die Allgemeinheit verfügbar.

 **WARNUNG**  
Bei Wiederverwendung besteht Kontaminationsgefahr.

Nicht aus Naturkautschuk hergestellt



HERGESTELLT  
IN CHINA

REF

18000

REF

18001

REF

18002

REF

18003

REF

18004

REF

18005

REF

18010

REF

18015



Huanghua Promisee Dental Co., Ltd.  
Mould Industry Garden Empolder Section  
Huanghua, 061100 Hebei, P.R. China



Young Microbrush Ireland Ltd.  
Clogherane, Dungarvan  
Co. Waterford, X35 VE02, Ireland



MedNet EC-REP GmbH  
Borkstrasse 10, 48163 Münster  
Germany

Verantwortliche Person  
im Vereinigten  
Königreich

Medimap Ltd  
2 The Drift, Thurston  
Suffolk, IP31 3RT, United Kingdom

Hergestellt für: Young Innovations, Inc.  
2260 Wendt Street  
Algonquin, IL 60102 USA  
www.younginnovations.com  
(800) 325-1881

Pegasus Face Visor IFU Rev A  
2025-12-23

| Symbole                                                                             | Beschreibung                                                                                  | Symbole                                                                               | Beschreibung                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Produkterferenznummer                                                                         |  | Medizinisches Gerät               |
|  | Kann in einem Dampfsterilisator (Autoklav) bei der angegebenen Temperatur sterilisiert werden |  | Hersteller                        |
|  | Herkunftsland                                                                                 |  | Importeur                         |
|  | Zur Verwendung bis                                                                            |  | Autorisierter Vertreter in der EG |
|  | Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist                                           |  | CE-Kennzeichnung – Konformität    |
|  | Gebrauchsanweisung beachten                                                                   |  | Chargen- oder Losnummer           |
|  | Eindeutige Gerät-ID                                                                           |                                                                                       |                                   |