

Istruzioni per l'uso: kit visiera per il viso

Visiera sostituibile per proteggere il viso e gli occhi

- Rimuovere lo strato protettivo su entrambi i lati della visiera.
- Far scorrere il ritaglio sulla visiera sul punto di fissaggio su un lato della montatura.
- Piegare la visiera sul secondo punto di fissaggio.
- Far scorrere la visiera sul secondo punto di fissaggio.

Sterilizzabile in uno sterilizzatore a vapore (autoclave) alla temperatura specificata.

Istruzioni per la pulizia:

- Il telaio può essere sterilizzato utilizzando un ciclo standard in autoclave a vapore a 121 °C.
- Le visiere/gli schermi sono progettati per essere smaltiti dopo l'uso.

Disponibile anche:

Kit protezione occhi

- Kit di ricarica per visiera facciale
- Kit di ricarica per visiera protettiva

Kit di montaggio per occhiali

Solo per uso professionale. Non disponibile al pubblico.



ATTENZIONE
Rischio di contaminazione
in caso di riutilizzo



18000



18001



18002



18003

Non realizzato con lattice di gomma naturale



PRODOTTO
IN CINA



18004



18005



18010



18015



Huanghua Promisee Dental Co., Ltd.
Mould Industry Garden Empolder Section
Huanghua, 061100 Hebei, P.R. China



Young Microbrush Ireland Ltd.
Clogherane, Dungarvan
Co. Waterford, X35 VE02, Ireland



MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Münster
Germany

Responsabile nel
Regno Unito

Medimap Ltd
2 The Drift, Thurston
Suffolk, IP31 3RT, United Kingdom

Prodotto per:

Young Innovations, Inc.
2260 Wendt Street
Algonquin, IL 60102 USA
www.younginnovations.com
(800) 325-1881

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	Numero di riferimento del prodotto		Dispositivo medico
	Sterilizzabile in uno sterilizzatore a vapore (autoclave) alla temperatura specificata		Produttore
	Paese di origine		Importatore
	Data di scadenza		Rappresentante autorizzato per la Comunità Europea
	Non usare se la confezione è danneggiata		Conformità alla marcatura CE
	Consultare le istruzioni per l'uso		Codice del lotto
	Identificativo unico del dispositivo		