

Instrukcja obsługi: Przyłbica ochronna

Wymienna osłona do ochrony twarzy i oczu

- Zdejmij warstwę zabezpieczającą po obu stronach przyłbicy.
- Wsuń wycięcie przyłbicy w punkt zamocowania z jednej strony oprawki.
- Nagnij przyłbicę do drugiego punktu zamocowania.
- Wsuń wycięcie przyłbicy w drugi punkt zamocowania.

Można sterylizować metodą parową (w autoklawie) w podanej temperaturze.

Wytyczne czyszczenia:

- Oprawkę można sterylizować w cyklu standardowego autoklawu parowego w temperaturze nieprzekraczającej 121°C.
- Przyłbice/osłony ochronne należy wyrzucić po użyciu.

Także dostępne:

Zestaw osłon oczu

- Zestaw uzupełniający przyłbic ochronnych
- Zestaw uzupełniający osłon oczu

Zestaw ochronny okularowy

Tylko do użytku profesjonalnego. Produkt niedostępny do ogólnego stosowania.



OSTRZEŻENIE
Ryzyko zanieczyszczenia w przypadku ponownego użycia



18000



18001



18002



18003

Nie zawiera naturalnego lateksu
kautczukowego



WYPRODUKOWANO
W CHINACH



18004



18005



18010



18015



Huanghua Promisee Dental Co., Ltd.
Mould Industry Garden Empolder Section
Huanghua, 061100 Hebei, P.R. China



Young Microbrush Ireland Ltd.
Clogherane, Dungarvan
Co. Waterford, X35 VE02, Ireland



MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Münster
Germany

Osoba odpowiedzialna
w Wielkiej Brytanii

Medimap Ltd
2 The Drift, Thurston
Suffolk, IP31 3RT, United Kingdom

Wyprodukowano dla:

Young Innovations, Inc.
2260 Wendt Street
Algonquin, IL 60102 USA
www.younginnovations.com
(800) 325-1881

Symbol	Opis	Symbol	Opis
	Numer referencyjny produktu		Wyrób medyczny
	Można sterylizować metodą parową (w autoklawie) w podanej temperaturze		Producent
	Kraj pochodzenia		Importer
	Termin ważności		Autoryzowany przedstawiciel na terenie Wspólnoty Europejskiej
	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone		Oznakowanie zgodności CE
	Zapoznać się z instrukcją obsługi		Kod partii lub serii
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		