

Bruksanvisning: Visirkit

Utbytbart visir som skyddar ansikte och ögon

- Dra av skyddsfilmen på båda sidorna av visiret.
- Skjut in visirets utskärning i fästpunkten på ena sidan av ramen.
- Böj över visiret till den andra fästpunkten.
- Skjut in visirets utskärning i den andra fästpunkten.

Kan steriliseras i en ångsteriliserare (autoklav) vid specificerad temperatur.

Rengöringsinstruktioner:

- Ramen kan steriliseras med hjälp av en ångautoklavcykel av standardtyp till 121°C.
- Visir/skydd är designade för att kasseras efter användning.

Också tillgängligt:

Ögonskyddskit

- Refillkit för visir
- Refillkit för ögonskydd

Kit för glasögonmontering

Endast för professionell användning. Ej tillgänglig för allmänheten.



18000



18001



18002



18003

Tillverkad utan naturgummilatex



TILLVERKAD
I KINA



18004



18005



18010



18015



Huanghua Promisee Dental Co., Ltd.
Mould Industry Garden Empolder Section
Huanghua, 061100 Hebei, P.R. China



Young Microbrush Ireland Ltd.
Clogherane, Dungarvan
Co. Waterford, X35 VE02, Ireland



MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Münster
Germany

Storbritannien
Ansvarig
person

Medimap Ltd
2 The Drift, Thurston
Suffolk, IP31 3RT, United Kingdom

Tillverkad för:

Young Innovations, Inc.
2260 Wendt Street
Algonquin, IL 60102 USA
www.younginnovations.com
(800) 325-1881

Symbol	Beskrivning	Symbol	Beskrivning
	Produktens referensnummer		Medicinsk enhet
	Kan steriliseras i en ångsteriliserare (autoklav) vid specificerad temperatur		Tillverkare
	Ursprungsland		Importör
	Sista förbrukningsdag		Auktoriserad representant i den europeiska gemenskapen
	Använd ej om förpackningen är skadad		Överensstämmelse med CE-märkning
	Se bruksanvisning		Batch- eller partikod
	Unik enhetsidentifierare		