

Gebruiksaanwijzing: compule-doseerpistool

Productomschrijving: het Unodent compule-doseerpistool is een klein, nauwsluitend doseerpistool voor composietharsen, cementen, glasionomeren, afdruk materiaal, naaldbuisjes en pluggen. Ergonomisch ontworpen voor eenvoudig en snel laden, geschikt voor de meeste ampullen en ideaal voor materialen van elke viscositeit.

Gebruiksindicatie: het doseerpistool is ontworpen voor het snel en eenvoudig doseren van composietmaterialen in capsules, waardoor directe toediening aan één patiënt mogelijk is. Het Unodent doseerpistool voor capsules is geschikt voor de meeste standaard vulnaalden en andere voorgeladen tips. Bevestig de capsule eenvoudig aan de gleuf van het doseerpistool en knijp in het pistool om het tandheelkundig materiaal gemakkelijk uit de capsule te duwen en te doseren. Het soepele en moeiteloze trekkermechanisme zorgt ervoor dat de doseertip tijdens het doseren onder controle blijft, en de cilinder met frictievergrendeling maakt het gemakkelijk om de meeste standaard capsules te laden.

Waarschuwing: Niet autoclaveren boven 135 °C (275°F).

Beperking van herverwerking: herhaalde verwerking heeft minimale invloed op de prestaties. Het einde van de levensduur van een product wordt daardoor echter bepaald door slijtage en schade als gevolg van het overschrijden van de sterilisatielimiet, of door de manier waarop de gebruiker het product gebruikt en behandelt.

Plaats van behandeling: maak het oppervlak schoon met een wegwerpdoekje of papieren handdoek.

Ontsmetting: gebruik alleen een desinfecterende oplossing die geschikt is voor synthetisch materiaal en volg daarbij nauwgezet de aanwijzingen van de betreffende fabrikant. Desinfecterende oplossing grondig verwijderen onder stromend water. Overschrijd 93 °C niet voor mechanische ontsmetting.

Sterilisatie: het doseerpistool kan worden gesteriliseerd met alle koudsterilisatietechnieken, ethyleenoxide (ETO), stoomautoclaaf of chemiclaaf. Het is autoclaveerbaar tot 275°F.

Controle/functionele inspectie: visuele controle op beschadigingen, slijtage en vervorming.

Opslag en transport: geen speciale vereisten.

De aanwijzingen zijn gevalideerd en GESCHIKT bevonden voor de bereiding en het hergebruik van een medisch hulpmiddel door de fabrikant van het medisch hulpmiddel. Het is de verantwoordelijkheid van de herverwerkers dat de daadwerkelijke verwerking het gewenste resultaat oplevert met de gebruikte apparatuur en materialen en het personeel dat op de verwerklocatie werkzaam is. Normaal validatie en routinematige controle zijn nodig. Bovendien dient de herverwerker elke afwijking van de gegeven aanwijzingen met betrekking tot de efficiëntie en mogelijke nadelige gevolgen te evalueren.

Elk ernstig incident dat verband houdt met het apparaat moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Alleen voor professioneel gebruik. Niet beschikbaar voor het algemeen publiek.



GEMAAKT IN
CHINA



FAX660
(116150UNODENT)



FAX662
(116152UNODENT)



FAX661
(116151UNODENT)



Huanghua Promisee Dental Co., Ltd.
Mould Industry Garden Empolder Section, Huanghua,
061100 Hebei, P.R. China



Young Microbrush Ireland Ltd.
Clogherane, Dungarven
Co. Waterford, X35 VE02, Ireland



MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Germany

Verantwoordelijke
persoon in het Verenigd
Koninkrijk

Medimap Ltd
2 The Drift, Thurston, Suffolk, IP31 3RT, United Kingdom



DD Products & Services Ltd, 6 Perry Way, Witham, Essex, CM8 3SX.
Tel: (01376) 500582. Email: feedback@unodent.com



Trasmore Ltd, T/A DMI, Kellystown House, Kellystown Lane, Leixlip,
Co Kildare, W23 VF9P, Ireland Tel: +353 1 4273700

Symbol	Beschrijving	Symbol	Beschrijving
	Productreferentienummer		Medisch apparaat
	Steriliseerbaar d.m.v. stoomsterilisatie (autoclaaf) met de aangegeven temperatuur		Fabrikant
	Land van herkomst		Importeur
	Houdbaarheidsdatum		Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
	Niet-steriel		Distributeur
	Niet gebruiken als verpakking is beschadigd		Conformiteit CE-markering
	Raadpleeg gebruiksaanwijzing		Batch- of partijcode
	Unieke apparaatidentificatie (UDI)		