

Instructions d'utilisation : pistolet applicateur de compules

Description du produit : le pistolet applicateur de compules d'Unodent est un petit pistolet applicateur de compules ergonomique qui offre un bon effet de levier lors de la mise en place de résines composites, de ciments, de verre ionomères, de matériaux à empreinte, de tubes à aiguille et de bouchons. Conçu de manière ergonomique pour un chargement facile et rapide, il accepte la plupart des cartouches et est idéal pour tous les matériaux, quelle que soit leur viscosité.

Indication d'utilisation : le pistolet applicateur de compules est conçu pour permettre une distribution rapide et facile de matériaux composites sous forme de compules, ce qui permet une administration directe à un seul patient. Le pistolet applicateur de compules d'Unodent fonctionne avec la plupart des embouts standard et autres embouts préchargés. Il suffit de fixer la compule dans la fente du pistolet applicateur de compules et d'appuyer sur le pistolet applicateur pour pousser et distribuer facilement le matériau dentaire contenu dans la compule. Le mécanisme de déclenchement facile et sans effort permet de garder le contrôle de l'embout de la compule pendant la distribution, et le cylindre à verrouillage par friction facilite le chargement de la plupart des compules de matériaux standard.

Avertissement : ne pas placer dans un autoclave et stériliser en laissant un cycle supérieur à 275°F.

Limitation de retraitement : le traitement répété a un effet minimal sur les performances. Cependant, la fin de la durée de vie d'un produit est déterminée par l'usure et les dommages dus au dépassement de la limite de stérilisation, ou par la manière dont l'utilisateur l'utilise et le manipule.

Lieu de manipulation : nettoyez la surface avec un chiffon jetable ou une lingette en papier.

Désinfection : utilisez uniquement une solution désinfectante adaptée aux matériaux synthétiques, en suivant attentivement les instructions du fabricant concerné. Éliminez soigneusement la solution désinfectante sous l'eau courante. Ne dépassez pas 93 °C pour la désinfection mécanique.

Stérilisation : le pistolet applicateur de compules peut être stérilisé à l'aide de toutes les techniques de stérilisation à froid, à l'oxyde d'éthylène (ETO), à l'autoclave à vapeur ou au chemoclave. Il est autoclavable jusqu'à 275°F.

Contrôle/Vérification fonctionnelle : vérifiez si le produit est abîmé, usé ou déformé.

Stockage et transport : aucune exigence particulière.

Les instructions ont été validées par le fabricant du dispositif médical comme étant APPROPRIÉES pour préparer un dispositif médical à la réutilisation. Il incombe aux entreprises de retraitement de veiller à ce que le retraitement effectif atteigne le résultat requis avec les équipements, les matériaux utilisés et le personnel impliqué sur le site de retraitement. En règle générale, une validation et un contrôle de routine sont nécessaires. En outre, l'entreprise de retraitement doit évaluer tout écart par rapport aux instructions fournies en matière d'efficacité et les conséquences négatives possibles.

Tout incident grave lié à l'utilisation de ce dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient réside.

Réservé à un usage professionnel. Non disponible au grand public.



FAX660
(116150UNODENT)



FAX662
(116152UNODENT)



FAX661
(116151UNODENT)



FABRIQUÉ EN
CHINE



Huanghua Promisee Dental Co., Ltd.
Mould Industry Garden Empolder Section, Huanghua,
061100 Hebei, P.R. China



Young Microbrush Ireland Ltd.
Clogherane, Dungarven
Co. Waterford, X35 VE02, Ireland



MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Germany

Responsable Au
Royaume-Uni

Medimap Ltd
2 The Drift, Thurston, Suffolk, IP31 3RT, United Kingdom



DD Products & Services Ltd, 6 Perry Way, Witham, Essex, CM8 3SX.
Tel: (01376) 500582. Email: feedback@unodent.com



Trasmore Ltd, T/A DMI, Kellystown House, Kellystown Lane, Leixlip,
Co Kildare, W23 VF9P, Ireland Tel: +353 1 4273700

Symbole	Description	Symbole	Description
	Numéro de référence		Dispositif médical
	Stérilisable dans un stérilisateur à vapeur (autoclave) à la température spécifiée.		Fabricant
	Pays d'origine		Importateur
	Date limite d'utilisation		Représentant autorisé dans la Communauté européenne
	Non stérile		Distributeur
	Ne pas utiliser si l'emballage est abîmé		Marquage CE Conformité
	Lire les instructions d'utilisation		Numéro de lot
	Identifiant unique de dispositif		