

Gebrauchsanweisung: pistolet applicateur de compules

Produktbeschreibung: Die Unodent Compule-Dispenserpistole ist eine kleine, ergonomisch geformte Dispenserpistole, die beim Auftragen von Kompositen, Zementen, Glasionomeren, Abformmaterialien sowie von Kanülen, Tuben und Stopfen die richtige Hebelwirkung bietet. Ergonomisch gestaltet für einfaches und schnelles Befüllen, nimmt sie die meisten Kapseln auf und ist ideal für Materialien aller Viskositäten.

Anwendungsgebiet: Die Compule-Dispenserpistole ist dafür konzipiert, das schnelle und einfache Auftragen von Kompositmaterialien aus Kapseln zu ermöglichen und eine direkte Anwendung für jeden einzelnen Patienten zu gewährleisten. Die Unodent Compule-Dispenserpistole ist kompatibel mit den meisten standardmäßigen Materialkapseln sowie anderen vorgefüllten Aufsatzspitzen. Befestigen Sie die Kapsel einfach im Schlitz der Compule-Dispenserpistole und drücken Sie die Pistole zusammen, um das Dentalmaterial mühelos aus der Kapsel zu drücken und zu dosieren. Der sanfte und mühelose Abzugmechanismus hilft, die Kontrolle über die Kapselspitze während des Dosierens zu behalten, und der Friktionsverschluss-Zylinder ermöglicht ein einfaches Befüllen der meisten standardmäßigen Materialkapseln.

Warnhinweis: Nicht über 135°C autoklavieren.

Einschränkung der Wiederaufbereitung: Wiederholte Aufbereitung hat nur geringe Auswirkungen auf die Leistung. Das Ende der Lebensdauer des Produkts wird jedoch durch Verschleiß, Schäden durch Überschreiten der Sterilisationsgrenze oder durch Art und Weise der Nutzung und Handhabung durch den Anwender bestimmt.

Handhabung: Oberfläche mit einem Einmaltuch oder Papiertuch reinigen.

Desinfektion: Verwenden Sie ausschließlich ein für Kunststoff geeignetes Desinfektionsmittel und beachten Sie dabei sorgfältig die Anweisungen des jeweiligen Herstellers. Spülen Sie das Desinfektionsmittel gründlich unter fließendem Wasser ab. Für die maschinelle Desinfektion 93 °C nicht überschreiten.

Sterilisation: Die Compule-Dispenserpistole kann mit allen Kaltsterilisationsverfahren, Ethylenoxid (ETO), Dampfautoklav oder Chemiklav sterilisiert werden. Sie ist bis zu 135°C autoklavierbar.

Kontroll-/Funktionsprüfung: Sichtprüfung auf Schäden, Verschleiß und Verformungen.

Lagerung und Transport: Keine besonderen Anforderungen.

Die Anweisungen wurden als GEEIGNET für die Aufbereitung des Medizinprodukts und dessen Wiederverwendung durch den Hersteller des Medizinprodukts validiert. Es liegt in der Verantwortung des Wiederaufbereiters, sicherzustellen, dass die Aufbereitung mit den eingesetzten Geräten und Materialien sowie dem am Aufbereitungsort eingesetzten Personal das erforderliche Ergebnis erzielt. Normalerweise sind Validierung und routinemäßige Kontrolle erforderlich. Darüber hinaus sollte der Wiederaufbereiter jede Abweichung von den vorgegebenen Anweisungen daraufhin prüfen, wie sich diese auf die Effizienz und mögliche nachteilige Folgen auswirkt.

Jedes schwerwiegende Ereignis im Zusammenhang mit dem Gerät sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde gemeldet werden, bei der der Anwender und/oder Patient registriert ist.

Nur für den professionellen Gebrauch. Nicht für die Allgemeinheit verfügbar.



FAX660
(116150UNODENT)



FAX662
(116152UNODENT)



FAX661
(116151UNODENT)

HERGESTELLT
IN CHINA



Huanghua Promise Dental Co., Ltd.
Mould Industry Garden Empolder Section, Huanghua,
061100 Hebei, P.R. China



Young Microbrush Ireland Ltd.
Clogherane, Dungarven
Co. Waterford, X35 VE02, Ireland



MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Germany

Verantwortliche Person im
Vereinigten Königreich Medimap Ltd
2 The Drift, Thurston, Suffolk, IP31 3RT, United Kingdom



DD Products & Services Ltd, 6 Perry Way, Witham, Essex, CM8 3SX.
Tel: (01376) 500582. Email: feedback@unodent.com



Trasmore Ltd, T/A DMI, Kellystown House, Kellystown Lane, Leixlip,
Co Kildare, W23 VF9P, Ireland Tel: +353 1 4273700

Symbole	Beschreibung	Symbole	Beschreibung
	Produktreferenznummer		Medizinisches Gerät
	Kann in einem Dampfsterilisator (Autoklav) bei der angegebenen Temperatur sterilisiert werden		Hersteller
	Herkunftsland		Importeur
	Zur Verwendung bis		Autorisierter Vertreter in der EG
	Nicht steril		Vertriebspartner
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist		CE-Kennzeichnung – Konformität
	Gebrauchsanweisung beachten		Chargen- oder Losnummer
	Eindeutige Gerät-ID		