

Instrukcja obsługi: Aplikator spustowy do kapsułek kompozytowych

Opis produktu: Aplikator spustowy do kapsułek kompozytowych Unodent to niewielki, podręczny pistolet do podawania kapsułek kompozytowych, umożliwiający precyzyjną aplikację żywicy kompozytowej, wypełnień cementowych, glasonomerów, masy wyciskowej, aplikatorów z igłą i ćwieków. Zaprojektowany ergonomicznie pod kątem łatwego i szybkiego ładowania, jest zgodny z większością kapsułek i idealnie nadaje się do podawania wszystkich materiałów plastycznych.

Wskazanie do stosowania: Aplikator spustowy do kapsułek kompozytowych został opracowany z myślą o szybkim i łatwym podawaniu kapsułkowych materiałów kompozytowych, przeznaczonych do bezpośredniej aplikacji u pojedynczego pacjenta. Aplikator spustowy do kapsułek kompozytowych Unodent jest zgodny z większością standardowych kapsułek i innych gotowych do użycia końcówek. Wystarczy załączyć kapsułkę do dyszy aplikatora i ścisnąć spustową rączkę, aby łatwo wysunąć materiał stomatologiczny z kapsułki. Płynnie działający mechanizm spustu pomaga bez wysiłku kontrolować końcówkę kapsułki podczas wyciskania, a dzięki stabilizującej blokadzie korpusu ładowanie większości standardowych kapsułek kompozytowych jest szybkie i proste.

Ostrzeżenie: Nie sterylizować w autoklawie powyżej temperatury 135°C (275°F).

Ograniczenie dotyczące dezynfekcji i sterylizacji: Powtarzające się cykle dezynfekcji i sterylizacji mają minimalny wpływ na skuteczność działania wyrobu, stąd koniec okresu eksploatacji aplikatora określa się na podstawie stopnia zużycia, wyznaczonego przekroczeniem dopuszczalnej liczby sterylizacji lub jakością obsługi przez użytkownika.

Czyszczenie: Powierzchnie aplikatora czyścić papierowym ręcznikiem lub jednorazową ściereczką.

Dezynfekcja: Używać wyłącznie roztworu do dezynfekcji przeznaczonego do materiałów syntetycznych, ściśle przestrzegając instrukcji producenta. Dokładnie spłukać pozostałości środka dezynfekującego pod bieżącą wodą. W przypadku dezynfekcji mechanicznej nie przekraczać temperatury 93°C.

Sterylizacja: Aplikator spustowy do kapsułek kompozytowych można sterylizować wszystkimi metodami sterylizacji na zimno, używając tlenu etylenu (EO), autoklawu parowego lub sterylizatora chemicznego. Maksymalny próg temperatury autoklawu to 135°C (275°F).

Inspekcja/kontrola działania: Wizualnie sprawdzić aplikator pod kątem uszkodzeń, stopnia zużycia lub odkształceń.

Przechowywanie i transport: Brak szczególnych wymagań.

Niniejsza instrukcja została przez producenta wyrobu medycznego zweryfikowana jako ODPOWIEDNIA do celów przygotowania wyrobu i jego wielokrotnego użytkowania. Obowiązkiem operatora wykonującego dezynfekcję i sterylizację wyrobu jest zadbanie, aby procesy te osiągnęły zamierzony rezultat, z wykorzystaniem zastosowanego sprzętu i materiałów oraz odpowiedniego personelu w placówce dezynfekcji i sterylizacji. Zastosowanie mają standardowe procedury weryfikacji i rutynowej kontroli. Ponadto operator wykonujący dezynfekcję i sterylizację powinien ocenić wszelkie odstępstwa od podanych instrukcji pod kątem ich skuteczności i potencjalnych skutków niepożądanych.

Wszelkie poważne incydenty, które wystąpiły w związku z wyrobem, należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi Państwa Członkowskiego będącego zwyczajowym miejscem pobytu użytkownika i/lub pacjenta.

Tylko do użytku profesjonalnego. Produkt niedostępny do ogólnego stosowania.



FAX660
(116150UNODENT)



FAX662
(116152UNODENT)



FAX661
(116151UNODENT)



WYKONANE W
CHINACH



Huanghua Promisee Dental Co., Ltd.
Mould Industry Garden Empolder Section, Huanghua,
061100 Hebei, P.R. China



Young Microbrush Ireland Ltd.
Clogherane, Dungarven
Co. Waterford, X35 VE02, Ireland



MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Germany

Responsabile nel
Regno Unito Medimap Ltd
2 The Drift, Thurston, Suffolk, IP31 3RT, United Kingdom



DD Products & Services Ltd, 6 Perry Way, Witham, Essex, CM8 3SX.
Tel: (01376) 500582. Email: feedback@unodent.com



Trasmore Ltd, T/A DMI, Kellystown House, Kellystown Lane, Leixlip,
Co Kildare, W23 VF9P, Ireland Tel: +353 1 4273700

Symbol	Opis	Symbol	Opis
	Numer referencyjny produktu		Wyrób medyczny
	Można sterylizować metodą parową (w autoklawie) w podanej temperaturze		Producent
	Kraj pochodzenia		Importer
	Termin ważności		Autoryzowany przedstawiciel na terenie Wspólnoty Europejskiej
	Wyrób niesterylny		Dystrybutor
	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone		Oznakowanie zgodności CE
	Zapoznać się z instrukcją obsługi		Kod partii lub serii
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		