

Instrucciones de uso: Pistola Dosificadora para Compules

Descripción del producto: la Pistola Dosificadora Unodent para Compules una compacta pistola dosificadora para compules que brinda la efectividad adecuada al aplicar resinas compuestas, ionómeros de vidrio, materiales de impresión, tubos de aguja y tapones. Su diseño ergonómico facilita y agiliza la carga, acepta la mayoría de carpules y es ideal para todo tipo de materiales viscosos.

Indicaciones de uso: la Pistola Dosificadora para Compules está diseñada para brindar un dosificación rápida y sencilla de materiales compuestos que permite la aplicación individual directa en el paciente. La Pistola Dosificadora Unodent para Compules funciona con la mayoría de los compules de materiales estándar y otras puntas precargadas. Basta con colocar el compul en la ranura de la Pistola Dosificadora para Compules y oprimir el gatillo de la pistola para dosificar el material dental del compul fácilmente. El mecanismo del gatillo es sencillo y no requiere esfuerzo, lo cual ayuda a mantener el control de la puta del compul al hacer la dosificación y el cilindro con bloqueo de fricción permite cargar fácilmente la mayoría de los compules de materiales estándar.

Aviso de advertencia: no introducir en el autoclave a más de 135°C (275°F).

Limitación de reprocesamiento: el procesamiento repetido tiene efecto mínimo sobre el desempeño; sin embargo, el final de la vida útil de los productos se determina por el desgaste y el daño debidos a ir más allá del límite de esterilización, o por la manera en la que el usuario haga uso de él y lo maneje.

Lugar de manejo: superficie limpia cubierta con un paño o una toalla de papel desechables.

Desinfección: use solamente una solución desinfectante adecuada para materiales sintéticos, siga con cuidado las instrucciones del fabricante respectivo. Elimine la solución desinfectante completamente con agua corriente. No exceda de 93 °C (199.4 °F) en la desinfección mecánica.

Esterilización: la Pistola Dosificadora para Compules puede esterilizarse por medio de todas las técnicas de esterilización en frío, óxido de etileno (OE), autoclave de vapor o de vapor químico (chemiclave). Se puede esterilizar en autoclave hasta una temperatura de 135°C (275°F).

Verificación de control/funcional: inspeccione visualmente en busca de signos de daño, desgaste o deformación.

Almacenamiento y transporte: no hay requisitos especiales.

Las instrucciones se han validado como ADECUADAS para la preparación de un dispositivo médico y su reutilización por parte del fabricante del dispositivo médico. Es responsabilidad de quien haga el reprocesamiento que el reprocesamiento real alcance el resultado requerido con el equipo y los materiales aplicados y el personal involucrado en el sitio del reprocesamiento. Normalmente son necesarios la validación y el control de rutina. Además, quien realice el reprocesamiento debe evaluar toda desviación con respecto a las instrucciones proporcionadas en cuanto a eficiencia y posibles consecuencias adversas.

Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el dispositivo debe informarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado Miembro en el que se encuentren el usuario o el paciente.

Para uso profesional exclusivamente. No disponible para el público en general.



REF

FAX660
(116150UNODENT)

REF

FAX662
(116152UNODENT)

REF

FAX661
(116151UNODENT)



FABRICADO EN CHINA



Huanghua Promisee Dental Co., Ltd.
Mould Industry Garden Empolder Section, Huanghua,
061100 Hebei, P.R. China



Young Microbrush Ireland Ltd.
Clogherane, Dungarven
Co. Waterford, X35 VE02, Ireland

EU

REP

MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Germany

Persona responsable en el Reino Unido

Medimap Ltd
2 The Drift,Thurston, Suffolk, IP31 3RT, United Kingdom



DD Products & Services Ltd, 6 Perry Way, Witham, Essex, CM8 3SX.
Tel: (01376) 500582. Email: feedback@unodent.com



Trasmore Ltd. T/A DMI, Kellystown House, Kellystown Lane, Leixlip,
Co Kildare, W23 VF9P, Ireland Tel: +353 1 4273700

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Número de referencia del producto		Dispositivo médico
	Esterilizable en esterilizador de vapor (autoclave) a la temperatura especificada.		Fabricante
	País de origen		Importador
	Usar antes de	EU REP	Representante autorizado en la Comunidad Europea
	No estéril.		Distribuidor
	No utilizar si el empaque está dañado.		Cumplimiento del Marcado CE
	Consulte las instrucciones de uso.	LOT	Código de lote
	Identificador Único del Dispositivo		