

Bruksanvisning: Kapselpistol

Produktbeskrivning: Unodent Compule Dispenser Gun är en liten, ergonomiskt utformad kapselpistol som ger rätt hävkraft vid applicering av kompositmaterial, cement, glasjonomerer, avtrycksmaterial samt nålhylsor och pluggar. Den är ergonomiskt utformad för enkel och snabb påfyllning, den är kompatibel med de flesta kapslar, och den lämpar sig för material med alla viskositeter.

Bruksanvisning: Kapselpistolen är utformad för snabb och enkel dispensering av kompositmaterial i kapslar, vilket möjliggör direkt applicering till en enskild patient. Unodent Compule Dispenser Gun är kompatibel med de flesta kapslar och andra förfyllda spetsar i standardmaterial. Sätt bara in kapseln i pistolens fack och krama pistolen så att tandvårdsmaterialet enkelt trycks ut och dispensereras ut från kapseln. Den smidiga och enkla avtryckarmekanismen hjälper dig att bibehålla kontrollen över kapselspetsen under dispenseringen, och den friktionslåsta hylsan gör att du enkelt kan fylla på med de flesta kapslar i standardmaterial.

Varning: Autoklavera inte över 135°C.

Begränsning av reprocessering: Upprepad processering har minimal effekt på prestandan. Hur länge produkten håller beror därför på slitage och skador orsakade av att steriliseringsgränsen överskrids, eller hur den används och hanteras av användaren.

Plats för hantering: Ren yta med en engångsduk eller pappershandduk.

Desinfektion: Använd endast desinfektionslösning som är lämplig för syntetiskt material, och följ noggrant instruktionerna från respektive tillverkare. Skölj bort desinfektionslösningen grundligt under rinnande vatten. Överskrid inte 93°C för mekanisk desinfektion.

Sterilisering: Kapselpistolen kan steriliseras med hjälp av alla metoder för kall sterilisering, etylenoxid (ETO), ångautoklav eller kemiklav. Den kan autoklaveras upp till 135°C.

Kontroll/funktionskontroll: Okulär besiktning av skador, slitage, deformation.

Förvaring och transport: Inga särskilda krav.

Den medicinska enhetens tillverkare har validerat instruktionerna som LÄMPLIGA för förberedelse av en medicinsk enhet och dess återanvändning. Det är reprocesserarens ansvar att den faktiska reprocesseringen uppnår önskat resultat med den utrustning och de material som används och den personal som är involverad på platsen för återanvändning. Normalt är validering och rutinkontroll nödvändigt. Vidare bör reprocesseraren utvärdera alla eventuella avvikelser från de tillhandahållna instruktionerna angående effektivitet och eventuella oönskade konsekvenser.

Allvarliga incidenter som har inträffat i relation till enheten ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är bosatt.

Endast för professionell användning. Ej tillgänglig för allmänheten.



REF

FAX660
(116150UNODENT)

REF

FAX662
(116152UNODENT)

REF

FAX661
(116151UNODENT)



TILLVERKAD I
KINA



Huanghua Promisee Dental Co., Ltd.
Mould Industry Garden Empolder Section, Huanghua,
061100 Hebei, P.R. China



Young Microbrush Ireland Ltd.
Clogherane, Dungarven
Co. Waterford, X35 VE02, Ireland

EU

REP

MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Germany

Persona responsable en el Reino Unido

Medimap Ltd
2 The Drift,Thurston, Suffolk, IP31 3RT, United Kingdom



DD Products & Services Ltd, 6 Perry Way, Witham, Essex, CM8 3SX.
Tel: (01376) 500582. Email: feedback@unodent.com



Trasmore Ltd, T/A DMI, Kellystown House, Kellystown Lane, Leixlip,
Co Kildare, W23 VF9P, Ireland Tel: +353 1 4273700

Symbol	Beskrivning	Symbol	Beskrivning
	Produktens referensnummer		Medicinsk enhet
	Kan steriliseras i en ångsteriliserare (autoklav) vid specificerad temperatur		Tillverkare
	Ursprungsland		Importör
	Sista förbrukningsdag	EU REP	Auktoriserad representant i den europeiska gemenskapen
	Ej steril		Distributör
	Använd ej om förpackningen är skadad		Överensstämmelse med CE-märkning
	Se bruksanvisning	LOT	Batch- eller partikod
	Unik enhetsidentIFIERARE		